

Base Model

By Evolution

本説明書を必ずお読みになり、いつでも取り出せる場所に大切に保管して下さい。



 Evolution
TECHNOLOGIES®

取
扱
説
明
書

各部の名称



1. ブレーキハンドル
2. 調整つまみ
3. クッション座席
4. バックサポート
5. かご
6. 車輪

車いすとして使用しないで下さい。
座席に座っている時に歩行器を動かさないで下さい。

歩行器は定期点検が必要です。

ご使用頂く前に・・・

1. 附属品の確認

歩行器が届いたら、下記すべての附属品が含まれているか確認して下さい。欠けている部品がありましたら、すぐに販売店又は Evolutionまでご連絡下さい。

- a. 歩行器本体（座面、かご、車輪、ハンドル付き）（折りたたまれた状態）
- b. バックサポート
- c. ハンドル取付用つまみ2個、つまみ用ボルト2個、プラスチックリング2個
- d. 保証書
- e. 取扱説明書

2. 歩行器の組み立て

歩行器をご使用頂く前に、下記の手順で組立て下さい。

- ① 畳まれた状態の歩行器本体を取り出し、両サイドフレームを下に押すと歩行器が広がります。
- ② 下かごの上に座面をかぶせる様にして座面を固定します。詳細は次頁「3. 座面の使用方法」を参照して下さい。
- ③ 本体両サイドのフレームに附属のプラスチックリングをはめ、本体とワイヤーでつながっている左右のハンドルを本体フレームに差し込みます。附属のハンドル取り付け用つまみ用ボルトを本体フレームの穴に内側から差し込み、外側からつまみを使用してボルトを固定し、ハンドルを取り付けます。詳しくは5頁の「5. ハンドル高さの調整」を参照して下さい。
- ④ バックサポートのフレームを本体のフレームに差し込みます。この時両サイドの銀色のボタンを押しながらバックサポートフレームをカチッと音がするまで押し込んで下さい。詳しくは次頁「4. バックサポートの取り外し・調整方法」を参照して下さい。

注意：組立後、座席、ハンドル及びバックサポートがしっかりと固定されている事を必ず確認して下さい。

3. 座面の使用方法



1. 歩行器がきちんと開いた状態であることを確認して下さい。
2. 座面が上図の様にしっかりと下におろされた状態であることを確認して下さい。

注意：座面に座る前に必ず左右両輪に駐車ストップがかかっている事を確認の上、お座り下さい。（駐車ストップのかけ方は6頁「駐車ストップの操作方法」を参照して下さい。）


4. バックサポートの取り外し・調整方法



1. 左右バックサポートの銀色のボタンを押しながらフレームをスライドさせる事で高さを調節出来ます。希望する穴の部分でカチッと音がする事を確認して下さい。高さは2段階で調節出来ます。
2. バックサポートを取り外す場合、銀色のボタンを押しながら上図緑矢印の方向に引き上げます。
3. バックサポートを取り付ける場合はボタンを押しながらカチッと音がするまでフレームを押し込みます。

注意：バックサポートをご使用になる前に必ずしっかりと固定されている事を確認して下さい。又、両サイドが同じ高さであることを必ず確認して下さい。

ハンドル高さ調整

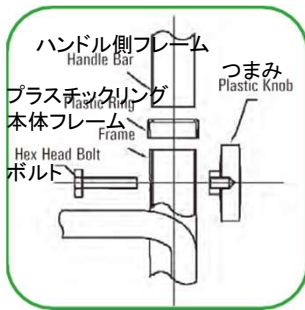

5. ハンドル高さの調整

ハンドルを適切な高さにセットするには、肩を平行に保ちながら歩行器の後ろに立ちます。ハンドルを使用者の手首の位置と同じ高さか、少し高め的位置に合わせます。療法士等が使用者のニーズに応じて上記とは異なる高さを提案する場合があります。

ハンドル高さを調整するには、まずつまみを緩め、つまみとボルトを取り外します。ハンドルフレームにある5つの穴から使用者に適した高さのものを選びます。ボルトをフレーム内側からはめ込み、外側からつまみを回して締め付け、ハンドルを固定します。

注意：締め付け過ぎない様にして下さい。

6. ハンドブレーキと駐車ストッパ（車輪）の確認

Evolutionのブレーキシステムは安全で使いやすい様に設計されています。歩行器をご使用前に必ず操作を確認して下さい。

ハンドブレーキと駐車ストッパの操作確認

ブレーキをかけるには左右のハンドブレーキハンドルを同時に握り、引き上げます。駐車ストッパをかけるにはクリック音がするまで左右両方のブレーキハンドルを押し下げます。

駐車ストッパと車輪ロックの確認

ブレーキシステムを確認して下さい。駐車ストッパをかけている時には車輪がロックされた状態になる事を確認して下さい。

**注意：歩行器を動かしている時に駐車ストッパをかけないで下さい。車輪が破損したり故障の原因となります。
座席を使用する前には必ず左右両輪に駐車ストッパをかけてから使用して下さい。**

ハンドブレーキの操作方法

ハンドブレーキハンドルを上引いてブレーキをかけます。

注意：ハンドブレーキをかけたまま歩行器を移動させないで下さい。

駐車ストッパの操作方法

駐車ストッパをかけるには、はっきりとクリック音が聞こえるまでハンドブレーキハンドル両方を押し下げます。必ず両方のブレーキがかかっている事を確認して下さい。駐車ストッパを解除するにはハンドブレーキハンドルを上引きます。

注意：座席を使用する際には、安全の為に必ず左右両輪に駐車ストッパがロックされている事を確認して下さい。

ハンドブレーキの調整方法

ブレーキケーブルシステムのテンションは定期的に調整する必要があります。左右のブレーキケーブルのテンションを調整するには、ハンドルとブレーキケーブルを繋いでいる左図AのナットとBの縦溝の入った部品を反時計回りに4回まわします。ハンドブレーキを操作しながら丁度良いテンションを確認し、適切な位置でナットAを締めなおします。この操作を行うのに工具等はありません。



注意：調整が終わったら必ず左右のハンドブレーキがきちんと効いている事を確認して下さい。

7. 歩行器の折りたたみ、持ち運び

折りたたみ：歩行器を折りたたむにはハンドブレーキを引き下げロックします。座席を上へ上げ、かごすぐ脇の両側フレームを持ち上げると歩行器を折りたたむ事が出来ます。

持ち運び：座席を上へ上げ、かごに付いている布製の取っ手を持ち上げる事で歩行器が折りたたまれた状態で運ぶ事が出来ます。

8. かごの取り外し

座席を上へ上げ、前後のフレームに付いているベルト5カ所のスナップを外してかごを取り外して下さい。

注意：かごが正しく取り付けられた場合にはカチッと音がしますので、しっかりと取り付けられている事を必ず確認して下さい。かごに乳幼児を乗せたり、座席に人を乗せたまま移動しないで下さい。

使用上のご注意(人への危害、財産の損害を防止する為、必ずお守り下さい。)

1. 最大使用者体重を必ずお守りください。
2. ご使用前に各部を点検し、ハンドブレーキの左右両輪性能を十分に確認してから使用して下さい。
3. 歩行器の組立及び調節を確実にし、全ての部品がしっかりと締められている事を確認して下さい。
4. タイヤやブレーキに摩耗がないかを常に点検し、必要に応じて交換して下さい。
5. 段差や溝等でご使用になる場合にはくれぐれもご注意下さい。
6. 夜間、交通が頻繁な場所や混雑している場所でご使用になる場合にはくれぐれもご注意下さい。
7. 座面をご使用になる前に必ず左右両輪に駐車ストッパをかけて下さい。傾斜地で座面に腰掛けないで下さい。
8. ハンドブレーキをかける時には左右両輪に同時にかけて下さい。

メンテナンス及びお手入れ

1. ナットやボルトがしっかり締められていることを定期的を確認します。
2. 月に一度はフレームや車輪に問題がないかを確認します。
3. 歩行器を雨ざらしにせず、濡れたら拭く等、常に乾いた状態にしてください。
4. 歩行器は室内で保管してください。
5. 高温多湿の場所で保管しないでください。（-40℃から+40℃の範囲内）
6. 瓦礫や障害物に車輪を乗り上げない様にして下さい。
7. 歩行器をしっかりと握る為にローションやオイル等のついた手で使用しないで下さい。
8. 歩行器についた泥や埃はきれいに落として下さい。
9. 駐車ストッパはしっかりとかけた状態にしてください。
10. 歩行器を使用する際に異常を感じたり、部品が欠けている場合には直ちに販売店や代理店、Evolutionまでご連絡下さい。

仕様

- 本体重量：7.7 kg
- 座席高さ：50 cm
- 座席幅：33 cm（折りたたみ時）
- 幅 x 長さ：55.5 cm x 62 cm
- ハンドル高さ：77.5 cm - 84 cm
- 最大使用者体重：100 kg

保証、修理、交換

Evolutionはユーザー様に業界最高品質と最高水準のサービスをご提供する事を心掛けております。もし歩行器に問題が生じたり、サポートを必要とされる場合には下記の手順でご連絡下さい。

1. **まず書類をご確認下さい。**歩行器と一緒に納品された取扱説明書のメンテナンス情報等をご確認下さい。
2. **弊社販売店にお電話頂くか、ご来店下さい。**歩行器の故障が保証対象のものであるかどうかを確認させて頂きます。

お客様ご相談窓口

日本 047-468-8894
カナダ 1.800.839.2558
米国 1.800.556.2558

保証期間内の修理、交換について

保証期間内で修理や交換のサービスを受けられる場合、商品返品確認番号（MRA番号）が必要となります。

MRA番号は弊社カスタマーサービスにお問い合わせ頂く事でご入手頂く事が出来ます。その際、下記をご用意頂きました上でご連絡お願い致します。

- (1) 商品番号 (2) シリアル番号 (3) 問題の具体的な内容

保証期間外又は保証対象外の修理について

保証期間外や保証対象に該当しない製品に関しては、ご希望により有料修理させて頂きます。

SGマーク制度は歩行車の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

ご返品にあたって

お客様の歩行器が不適切な使用状態による故障と弊社が判断致しました場合には保証対象外となります。歩行器をご返品頂く際にはMRA番号を必ず外箱にご記載下さい。又、返却先のご住所も必ずご同梱下さい。歩行器を必要とされるお客様の為に、弊社では出来るだけ早く修理を行い、返却する様に心がけておりますので、一日も早くお客様にお戻し致します為にも、上記の情報をお忘れなき様、お願い申し上げます

別売りアクセサリ

緑石クライマー

力を使わずに緑石や障害物を超える事が出来ます。

Evolution Technologies JAPAN Inc.
〒274-0060
千葉県船橋市坪井東6-14-23
Tel: 047-468-8894
www.evolutionjapan.co.jp

Evolution Technologies Inc.
2530 Davies Avenue
Port Coquitlam, BC V3C 2J9 CANADA
1 800.556.2558
www.evolution.ca



Evolution Technologies Inc.
2530 Davies Avenue
Port Coquitlam, BC V3C 2J9
CANADA

1 800.556.2558
www.evolution.ca

Evolution Technologies USA Inc.
2657 Delta Ring Road
Ferndale WA 98248
USA

1 800.839.2558
www.evolutionwalker.com

Evolution Technologies JAPAN Inc.

〒274-0060
千葉県船橋市坪井東6-14-23

047-468-8894

Assembled in China